

Kako preuzeti i instalirati **CONTOUR DIABETES** **APLIKACIJU**




Contour[®]
plus **ONE**»

Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Preuzimanje aplikacije

Korisnici iPhone ili iPad,
posetite App Store.

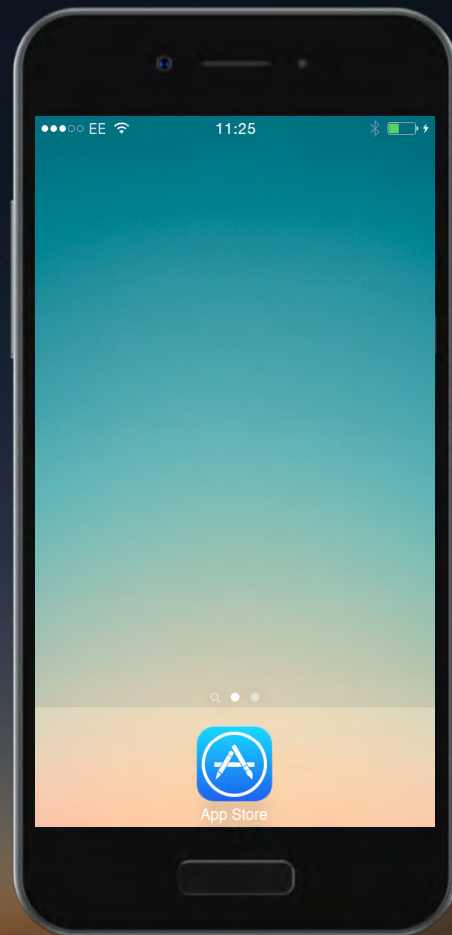


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Preuzimanje aplikacije

Korisnici iPhone ili iPad,
posetite App Store.

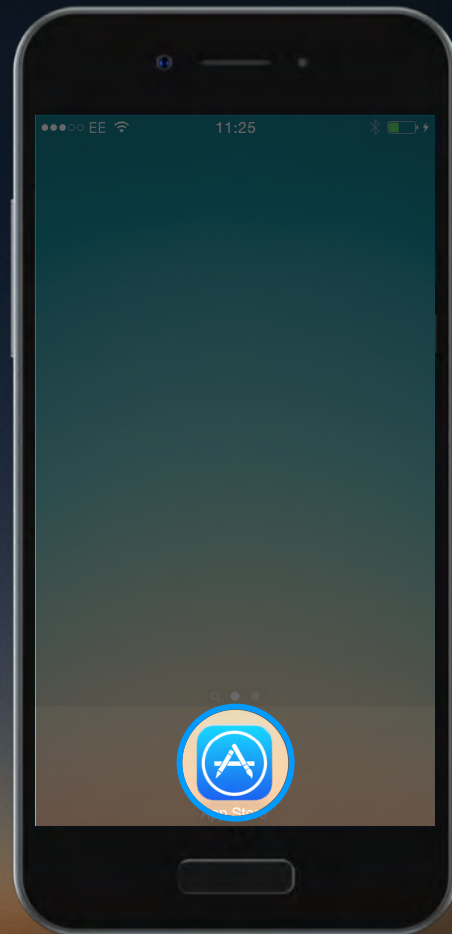

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Preuzimanje aplikacije

Potražite **CONTOUR
DIABETES** app.




Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Preuzimanje aplikacije

Potražite **CONTOUR
DIABETES** app.

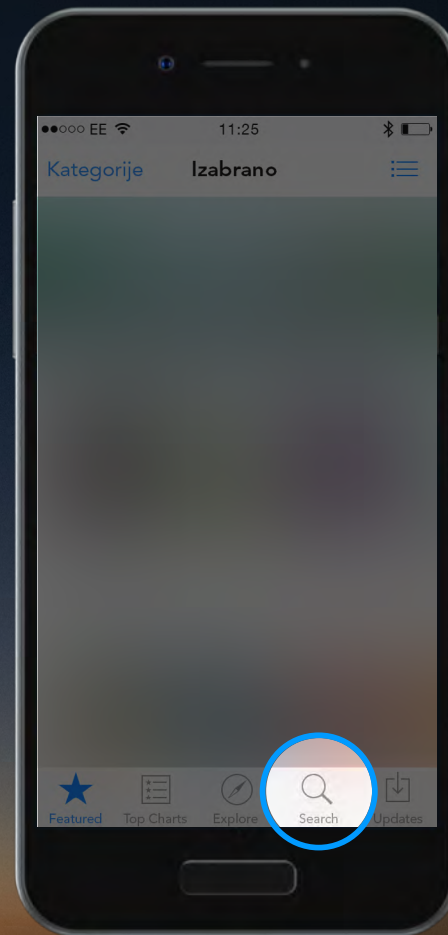


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Preuzimanje aplikacije

Potražite **CONTOUR
DIABETES** app.

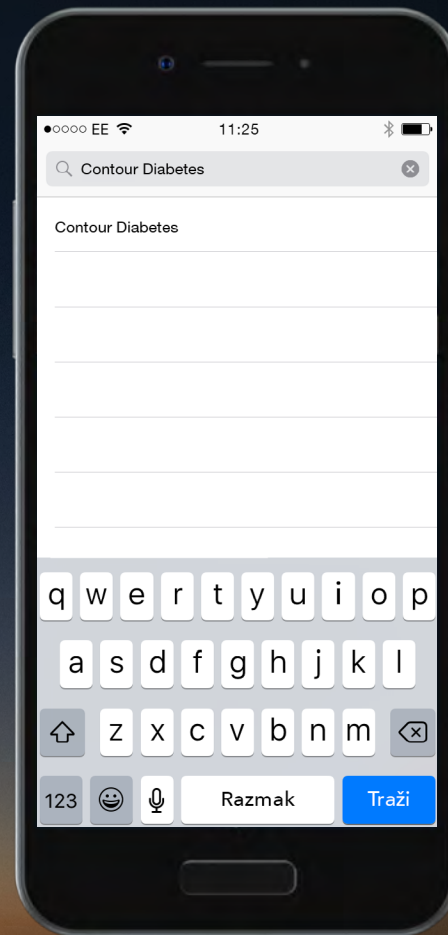


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Preuzimanje aplikacije

Potražite **CONTOUR
DIABETES** app.

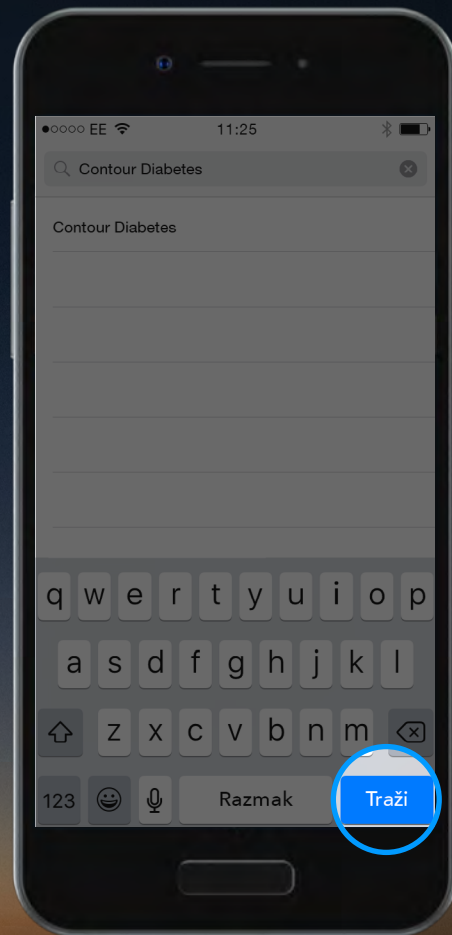


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Preuzimanje aplikacije

Odaberite opciju “Preuzmi”, pa onda “Instaliraj” kako bi otpočeli instalaciju **CONTOUR DIABETES aplikacije**.

Unesite lozinku onda kada se to od vas zatraži.

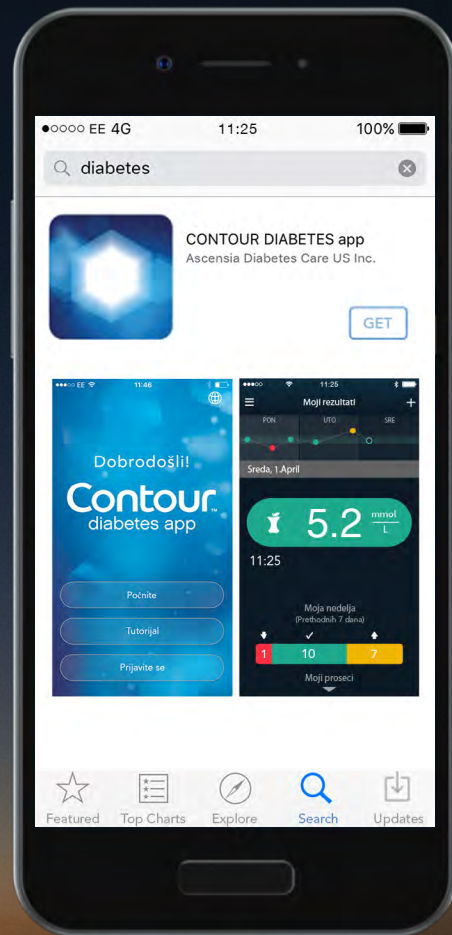


Contour[®]
plus **ONE**[™]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Preuzimanje aplikacije

Odaberite opciju “Preuzmi”, pa onda “Instaliraj” kako bi otpočeli instalaciju **CONTOUR DIABETES aplikacije**.

Unesite lozinku onda kada se to od vas zatraži.

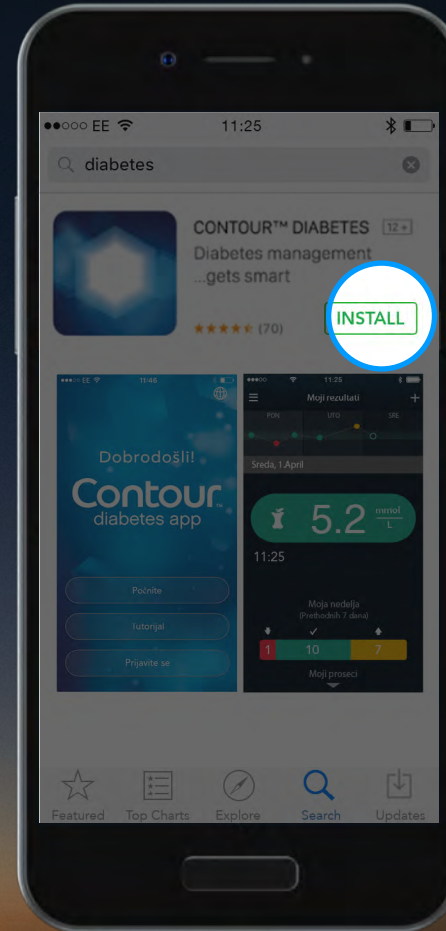


Contour[®]
plus **ONE**[®]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

4.

Instalacija aplikacije

Contour Diabetes aplikacija

počnje da se instalira.

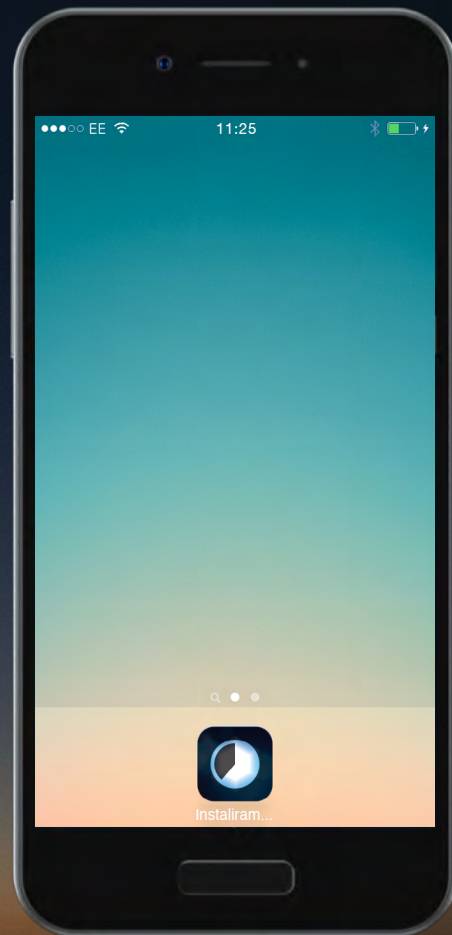


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

5.

Instalacija aplikacije

CONTOUR Diabetes aplikacija je sada instalirana.

Možete da pristupite podešavanju **Contour Diabetes aplikacije**.

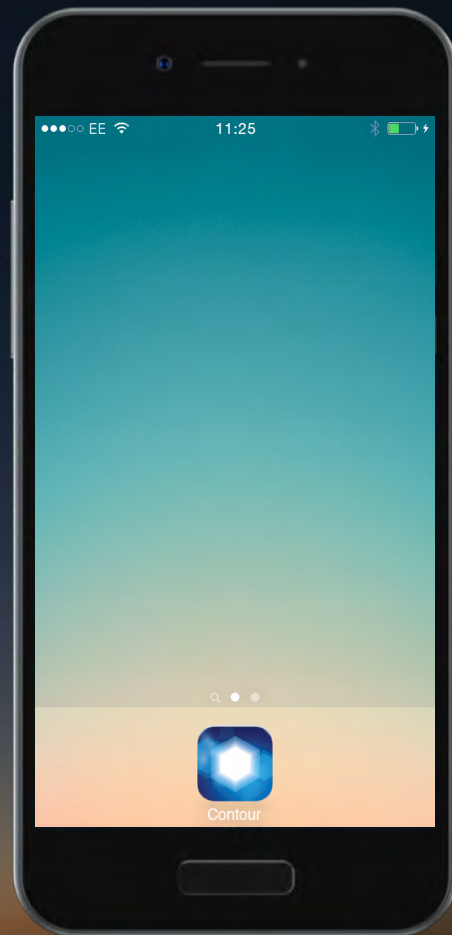

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

5.

Instalacija aplikacije

CONTOUR Diabetes aplikacija je sada instalirana.

Možete da pristupite podešavanju **Contour Diabetes aplikacije**.





Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

Ukoliko imate pitanja u vezi sa **CONTOUR PLUS** aparatom i **CONTOUR PLUS APLIKACIJOM** obratite se vašem zdravstvenom radniku i/ili detaljno proučite uputstvo za upotrebu sistema. Za više informacija o dostupnosti **CONTOUR PLUS ONE** aparata u vašoj zemlji, posetite www.contourplusone.rs



Preuzmite aplikaciju

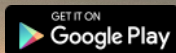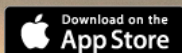

Apple i Apple logo su zaštićeni robni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge Apple Inc. Google play je zaštićena robna marka kompanije Google Inc.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care Logo i Contour su zaštićene robne marke kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Contour[®]
plus **ONE**[®]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi



Contour[®] diabetes solutions

