

The logo for Contour Plus ONE is centered on a dark blue gradient background. The word 'Contour' is in white, 'plus' is in white, and 'ONE' is in a bold, teal color with a double quote symbol. Below the main text, the description 'Sistem za merenje nivoa glukoze u krvi' is written in a smaller white font.

Contour[®] plus ONE»

Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

Uparivanje vašeg
CONTOUR PLUS ONE
naprednog aparata sa
CONTOUR DIABETES
aplikacijom



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

Uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat i on će se sinhronizovati sa **CONTOUR DIABETES aplikacijom** svaki put kada je Bluetooth konekcija moguća.




Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

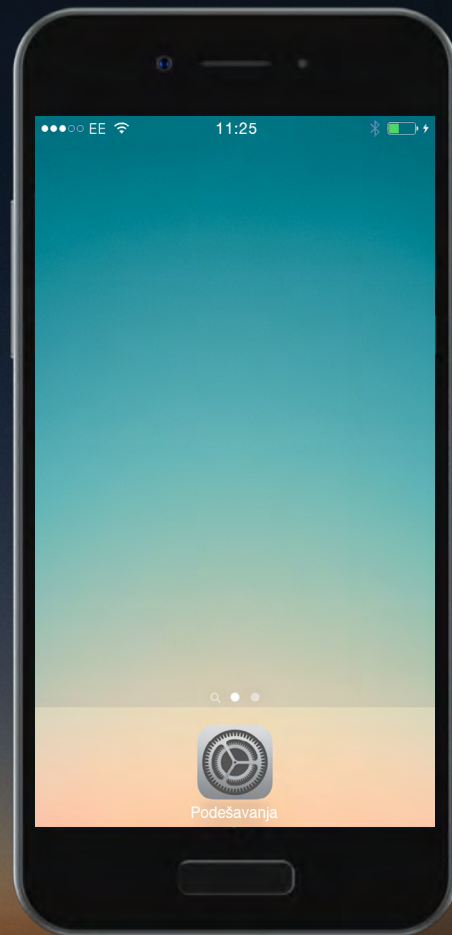


Contour
plus ONE
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

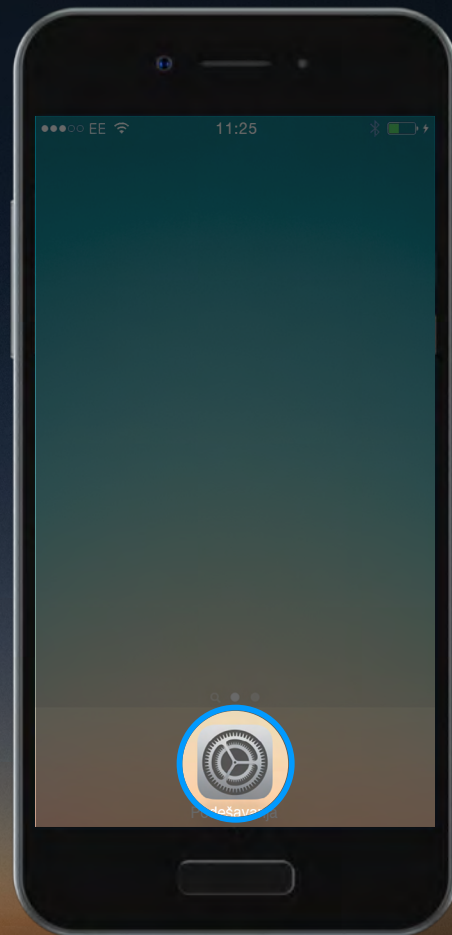


Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

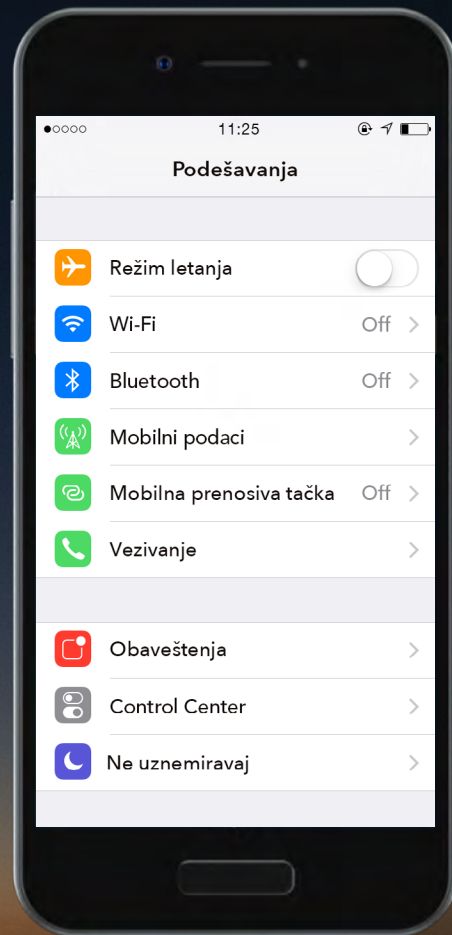


**Contour[®]
plus ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

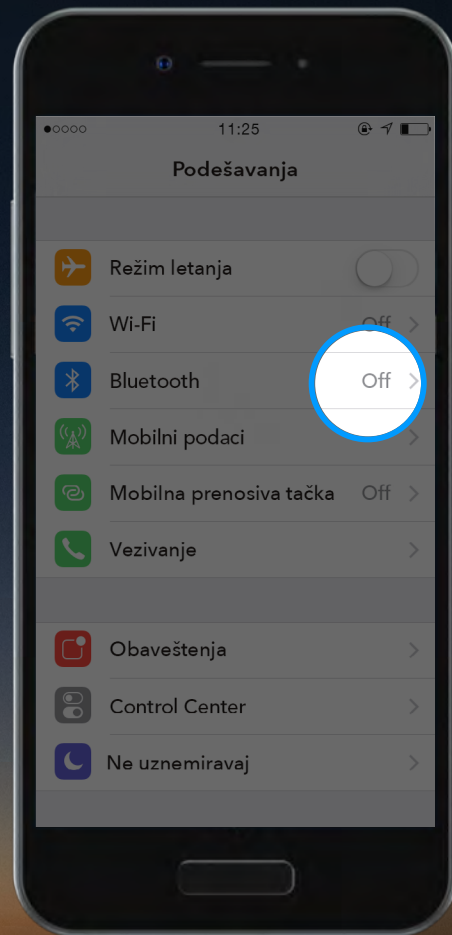


Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

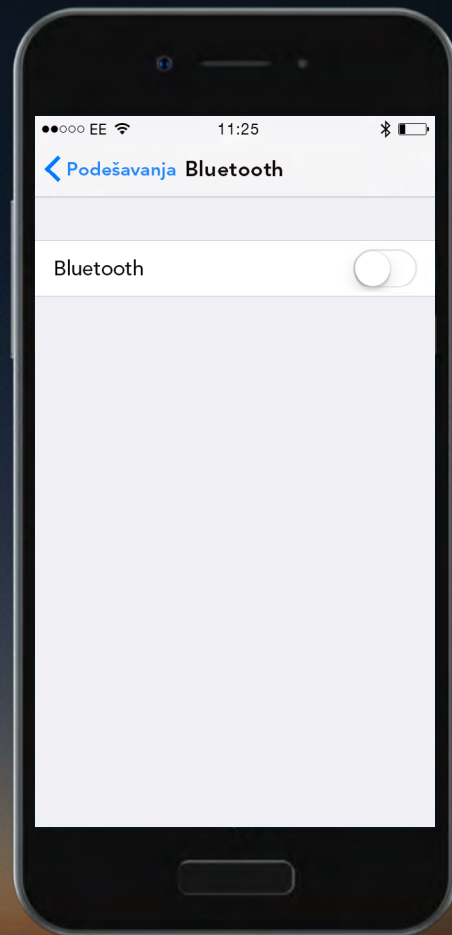


Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

1.

Uparivanje aparata

Pre nego da uparite vaš **CONTOUR PLUS ONE** aparat, aktivirajte Bluetooth opciju na vašem mobilnom uređaju.

Odaberite opciju “**Podešavanja**”, opciju “**Bluetooth**”, pa onda dodirnite preklopni prekidač i aktivirajte Bluetooth.

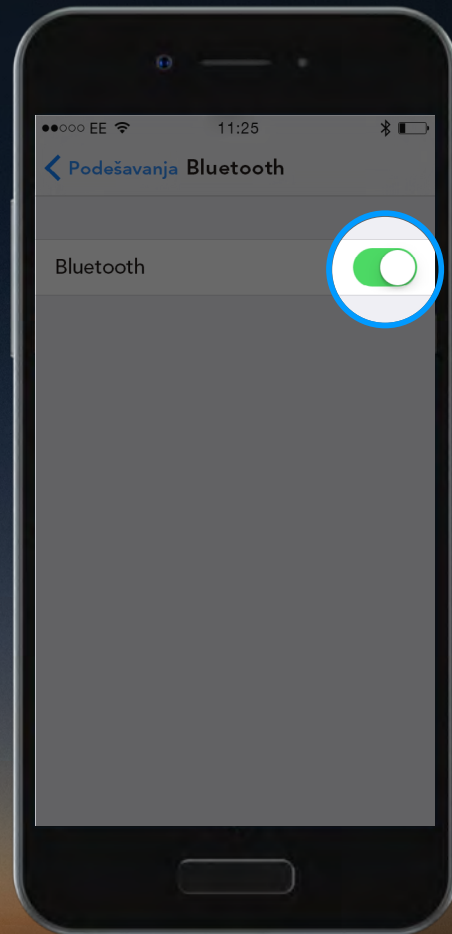

Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Uparivanje aparata

Nakon što ste otvorili vaš nalog u **CONTOUR DIABETES Aplikaciji**, od vas će biti traženo da uparite aparat.

Sada ste spremni da uparite vaš aparat. Upalite vaš aparat i držite ga blizu vašeg mobilnog uređaja.

Odaberite opciju: **Nastavite**



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

2.

Uparivanje aparata

Nakon što ste otvorili vaš nalog u **CONTOUR DIABETES Aplikaciji**, od vas će biti traženo da uparite aparat.

Sada ste spremni da uparite vaš aparat. Upalite vaš aparat i držite ga blizu vašeg mobilnog uređaja.

Odaberite opciju: **Nastavite**




**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Uparivanje aparata

Pritisnite i držite pritisnuto centralno dugme na vašem **CONTOUR PLUS ONE** aparatu. Dugme držite pritisnuto dok ulaz za test traku ne zatreperi plavim svetlom.

Odaberite opciju: **Nastavite**

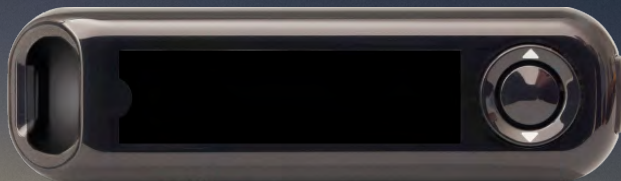

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Uparivanje aparata

Pritisnite i držite pritisnuto centralno dugme na vašem **CONTOUR PLUS ONE** aparatu. Dugme držite pritisnuto dok ulaz za test traku ne zatreperi plavim svetlom.

Odaberite opciju: **Nastavite**



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Uparivanje aparata

Pritisnite i držite pritisnuto centralno dugme na vašem **CONTOUR PLUS ONE** aparatu. Dugme držite pritisnuto dok ulaz za test traku ne zatreperi plavim svetlom.

Odaberite opciju: **Nastavite**



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

3.

Uparivanje aparata

Pritisnite i držite pritisnuto centralno dugme na vašem **CONTOUR PLUS ONE** aparatu. Dugme držite pritisnuto dok ulaz za test traku ne zatreperi plavim svetlom.

Odaberite opciju: **Nastavite**



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

4.

Uparivanje aparata

Odaberite polje sa serijskim brojem vašeg aparata.

Na poledini vašeg aparata se nalazi nalepnica sa navedenim serijskim brojem aparata.

Odaberite opciju: **Nastavite**



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi


4.

Uparivanje aparata

Odaberite polje sa serijskim brojem vašeg aparata.

Na poledini vašeg aparata se nalazi nalepnica sa navedenim serijskim brojem aparata.

Odaberite opciju: **Nastavite**

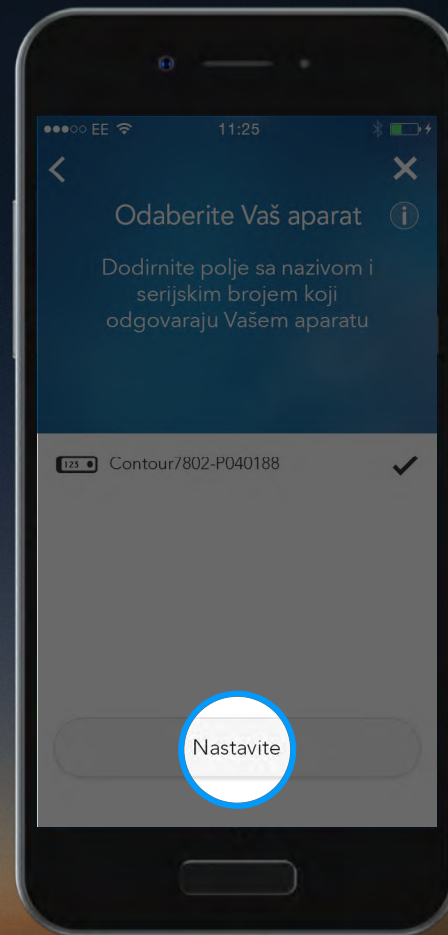


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

5.

Uparivanje aparata

CONTOUR DIABETES Aplikacija

će se sada povezati sa aparatom.

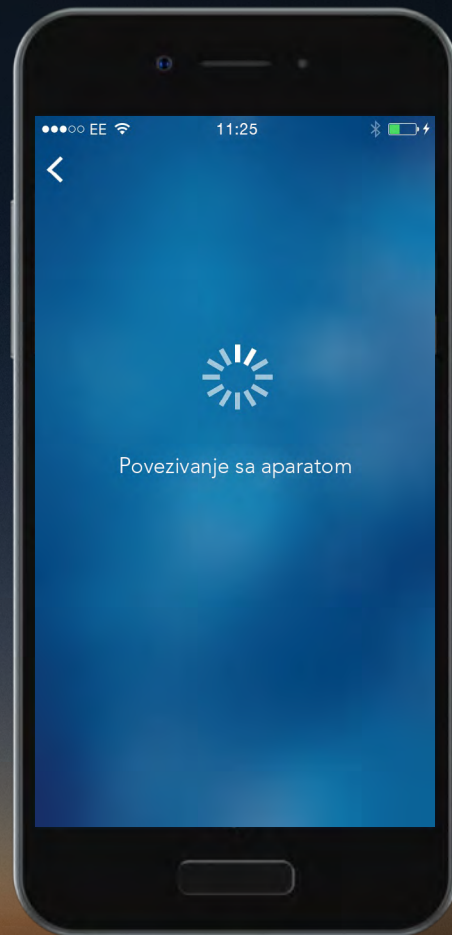


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

6.

Uparivanje aparata

Kako bi ste odobrili zahtev za uparivanjem odaberite opciju "Upari".

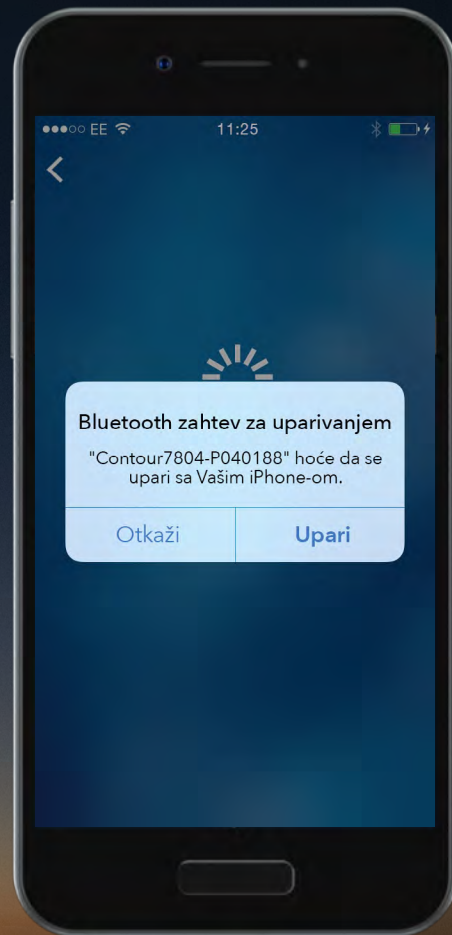


Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

6.

Uparivanje aparata

Kako bi ste odobrili zahtev za uparivanjem odaberite opciju "Upari".

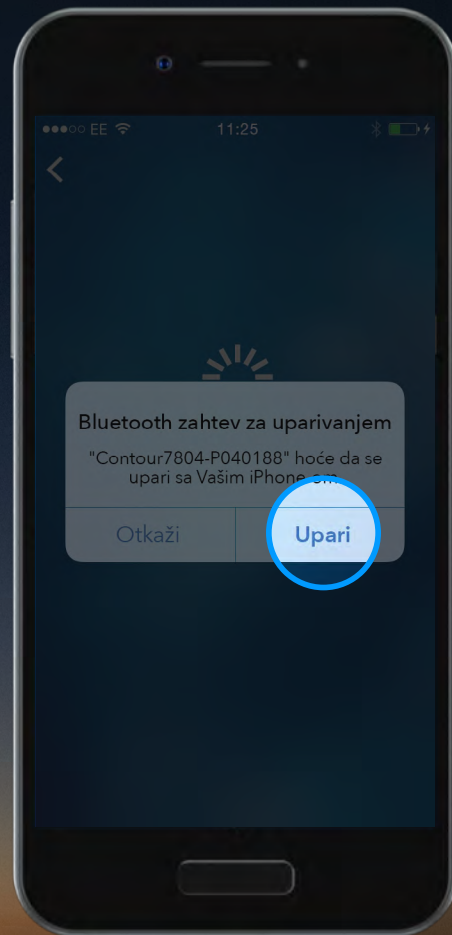


Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

6.

Uparivanje aparata

Kako bi ste odobrili zahtev za uparivanjem odaberite opciju “Upari”.

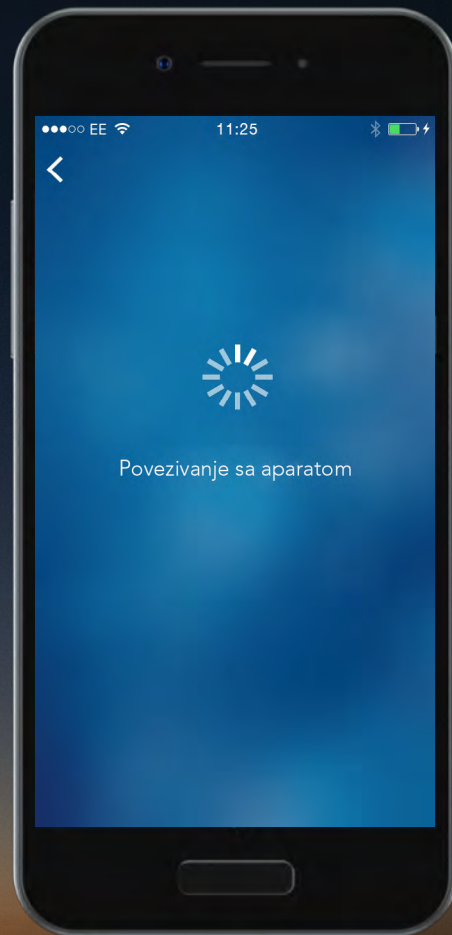

Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

7.

Uparivanje aparata

Kada ste uparili aparat odaberite opciju "Nastavi".

Sada ste spremni da izvršite podešavanja vaše **CONTOUR DIABETES Aplikacije.**



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

7.

Uparivanje aparata

Kada ste uparili aparat odaberite opciju "Nastavi".

Sada ste spremni da izvršite podešavanja vaše **CONTOUR DIABETES Aplikacije.**




Contour[®]
plus **ONE**
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi

Ukoliko imate pitanja u vezi sa **CONTOUR PLUS** aparatom i **CONTOUR PLUS APLIKACIJOM** obratite se vašem zdravstvenom radniku i/ili detaljno proučite uputstvo za upotrebu sistema. Za više informacija o dostupnosti **CONTOUR PLUS ONE** aparata u vašoj zemlji, posetite www.contourplusone.rs



Preuzmite aplikaciju

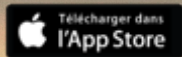

Apple i Apple logo su zaštićeni robni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge Apple Inc. Google play je zaštićena robna marka kompanije Google Inc.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care Logo i Contour su zaštićene robne marke kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Contour
plus ONE
Sistem za merenje
nivoa glukoze u krvi



Contour[®]
diabetes solutions

