


3. Usmerite lancetar u posudu za odlaganje oštirih predmeta (na primer, praznu plastičnu bocu sa poklopcem). Oznacite posudu na odgovarajuću način i čuvajte je van domašaja dece.
4. Pogurajte sivi izbacivač lancete tako da lanceta ispadne u posudu, i potom povucite izbacivač unazad.

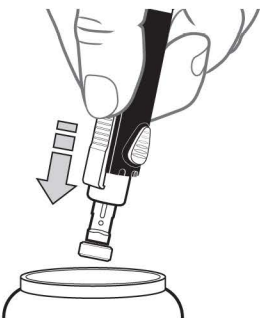


5. Stavite poklopac i **zaključajte** ga. Okrenite belu traku tako da se zaključa.

Uzimanje kapi krvi sa dlana

MERENJE NA ALTERNATIVNOM MESTU - DLAN ŠAKE

- Koristite **providni poklopac** za merenje na **alternativnom mestu**.
1. Uvucite lancetu kako je opisano u delu *Priprema lancetara*.
2. Stavite **providni** poklopac za merenje na alternativnom mestu i zaključajte ga. Okrećite belu traku sve dok ne čujete ili ne osetite da je sklopnulo, a bela i crna odignuta oznaka se ne poklope, kao što je prikazano.

Kad čujete „**škljoc**“ poklopac je zaključan

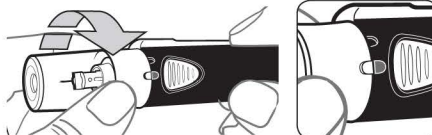

OPREZ: Nemojte koristiti **providni** poklopac na jagodici prsta.

3. Za ubod izaberite mesnato područje na dlanu. Izbegavajte vene, mladeže, kosti i tetive.

UPOZORENJE

- Pitajte svog lekara da li je merenje na alternativnom mestu primereno u Vašem slučaju.
- Rezultate dobijene merenjem na alternativnim mestima nemojte koristiti za kalibraciju uređaja za kontinuirano praćenje glukoze.
- Nemojte izračunavati dozu insulina na osnovu rezultata dobijenih merenjem na alternativnom mestu.

Nemojte vršiti merenje na alternativnom mestu u sledećim uslovima:

- Ako mislite da Vam je nivo glukoze u krvi nizak (hipoglikemija).
- Kada se nivo glukoze u krvi brzo menja (posle obroka, doze insulina ili fizičkih vežbi).
- Ako ne možete da osetite simptome niskog nivoa glukoze u krvi (neprepoznavanje hipoglikemije).
- Ako rezultati glukoze dobijeni sa alternativnih mesta nisu u skladu sa tim kako se Vi osećate.
- Tokom bolesti ili stresnih perioda.
- Ako ćete voziti automobil ili upravljati mašinama.


POTENCIJALNA BIOLOŠKA OPASNOST

- Lancetar MICROLET®NEXT je namenjen za samostalno merenje kod jednog pacijenta. Ne sme se koristiti na više osoba zbog rizika od infekcije.
- Lancete nemojte koristiti više puta. Korišćene lancete nisu sterilne. Za svako merenje koristite novu lancetu.
- Upotrebljene test trake i lancete uvek odložite kao medicinski otpad ili prema preporuci lekara.
- Pre i posle merenja ili upotrebe aparata, lancetara ili test traka obavezno dobro operite ruke sapunom i vodom i dobro ih osušite.


4. Povucite ručicu za resetovanje kako biste pripremili lancetar. Dugme za otpuštanje lancete je podignuto kad je lancetar spreman.
5. Čvrsto pritisnite lancetar na mesto uboda i pritisnite dugme za otpuštanje lancete **TAKO DA UREĐAJ SKLJOČNE**.



- (Ukoliko uređaj ne ubode prst, resetujte ponavljanjem koraka 4.)
6. Ne sklanjajte uređaj sa dlana. Održavajte stalan pritisak sve dok se ne formira mala, okrugla kap krvi ispod providnog poklopa.

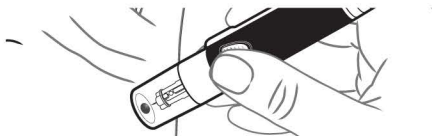

7. Podignite lancetar pravo nagore i sklonite ga sa kože, vodeći računa da ne razmazete kap krvi.
8. Merenje obavite odmah.

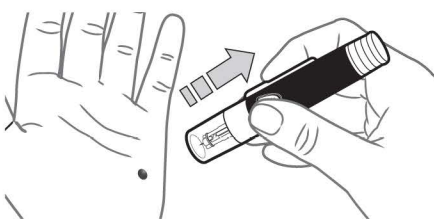

- Nemojte da vršite merenje uzorka krvi ako dobijete:
- razmazanu krv
 - suviše tečnu krv
 - zgrušanu krv
 - providnu tečnost pomešanu sa krvlju

9. Obrišite mesto uboda čistom, suvom maramicom i održavajte pritisak na mestu uboda sve do zaustavljanja krvarenja.

Videti: **Izbacite i odložite upotrebijenu lancetu**

Čišćenje

Očistite svoj lancetar jednom nedeljno. Koristite krpu nakvašenu izopropil alkoholom od 70% (može se kupiti u apotekama). Nemojte koristiti izbeljivač (natrijum hipohlorit).

Materijal potreban za čišćenje:

- krpa nakvašena izopropil alkoholom od 70% (može se kupiti u apotekama)
- Nemojte koristiti izbeljivač (natrijum hipohlorit).
- papirni ubrusi



1. Očistite **lancetar** izopropil alkoholom tako da se ukloni sva prljavština.
2. Po potrebi osušite čistim papirnim ubrusom.

Korisnički servis

Garancija: Vaš lancetar ima garanciju 5 godina.

Ako Vam je potrebna pomoć ili imate pitanja o merenju glukoze u krvi, obratite se lokalnom Korisničkom servisu kompanije na +381 11 304 77 44.

Lancetar MICROLET®NEXT:

[LANCING DEVICE] = Lancetar

[AST] = Merenje na alternativnom mestu

Lancete MICROLET®:

[LANCETS] = Lancete

= Ne koristiti ponovo

[STERILE] **[R]** = Sterilisano zračenjem

Lancetar MICROLET NEXT je proizveden u Poljskoj.

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Contour, Glucofacts, Microlet, logotip No Coding i Second-Chance predstavljaju robne marke i/ili registrovane robne marke kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima i navedene su isključivo u informativne svrhe. Ne treba pretpostavljati niti podrazumevati bilo kakvu vezu ili podršku.

Bayer i znak krsta kompanije Bayer predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bayer.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Ovlašćeni predstavnik
MEDINIC export-import doo
Danilčeva 57
11000 Beograd
Srbija
tel.+381113047744
www.medic.co.rs
Rešenje o registraciji broj
XXX-XX-XXXXX-XX od XXXX.XXXX

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

Informacije o patentima i povezanim licencama potražite na adresi
www.patents.ascensia.com.

85159542 Rev. 09/19

CE
2797




Microlet
next Lancetar



UPUTSTVO

- Izbacivač lancete za bezbedno odlaganje lancete.
- **Crno-beli** podesivi poklopac za merenje isključivo na jagodici prsta.
- **Providni** poklopac za merenje isključivo na alternativnom mestu.
- Lancetar MICROLET®NEXT i lancete MICROLET® se koriste za vađenje kapilarne krvi iz jagodice prsta ili iz dlana radi merenja glukoze u krvi.

Za merenje na **jagodici prsta i dlanu**

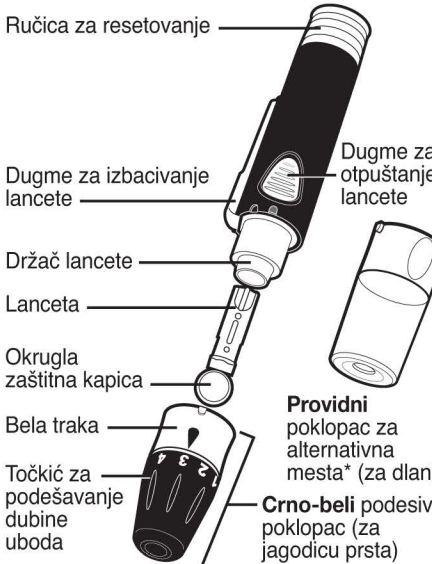


*Ne mora da se nalazi u svim kompletima. Može se naručiti od **distributera** pozivom.

Priprema lancetara

Upozorenje: *Držati van domašaja dece. Ovaj komplet sadrži male delove koji mogu dovesti do gušenja ukoliko se slučajno progutaju.*

1. Operite ruke i mesto uboda sapunom i toplom vodom. Dobro isperite i osušite ruke.

2. Otključajte poklopac. Okrenite belu traku tako da se bela odignuta oznaka poklopi sa crnom utisnutom oznakom, kao što je prikazano.

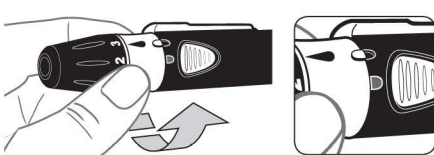


Kad čujete „**škljoc**“ poklopac je otključan

3. Skinite poklopac.


4. Olabavite okruglu zaštitnu kapicu na lancetu okretanjem za ¼ kruga, ali **nemojte skidati kapicu**.



5. Snažnim pokretom ubacite lancetu u lancetar. **Gurnite** lancetu do kraja.

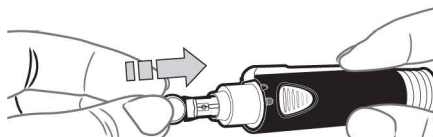

6. Pažljivo odvrnite okruglu zaštitnu kapicu. Sačuvajte kapicu za odlaganje upotrebljene lancete.

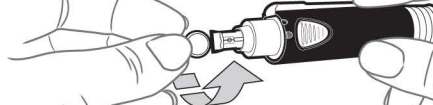

Uzimanje kapi krvi sa jagodice prsta

MERENJE SA JAGODICE PRSTA
Koristite **crno-beli** podesivi poklopac. Nemojte koristiti **providni poklopac** namenjen za **alternativna mesta**.


1. Stavite **crno-beli** podesivi poklopac na lancetar.
2. Zaključajte poklopac. Okrećite belu traku sve dok ne čujete ili ne osetite da je sklopnulo, a bela i crna odignuta oznaka se ne poklope, kao što je prikazano.



- Kad čujete „**škljoc**“ poklopac je zaključan
3. Da biste podesili dubinu uboda, okrenite toččić za podešavanje dubine uboda. Na dubinu uboda utiče i jačina pritiska koji izvršite na mesto uboda.



4. Povucite ručicu za resetovanje kako biste pripremili lancetar. Dugme za otpuštanje lancete je podignuto kad je lancetar spreman.

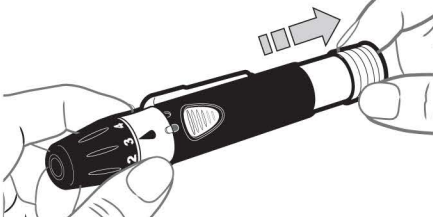


5. Čvrsto pritisnite lancetar na **bočnu stranu** prsta i pritisnite dugme za otpuštanje lancete **SVE DOK UREĐAJ NE SKLJOČNE**.




(Ukoliko uređaj ne ubode prst, resetujte ponavljanjem koraka 4.)

6. Pritiskajte šaku i prst prema mestu uboda da bi se stvorila kap krvi. Nemojte stezati predeo oko mesta uboda.

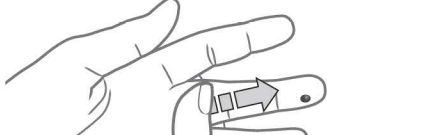

7. Merenje obavite odmah po formiranju male, okrugle kapi krvi.

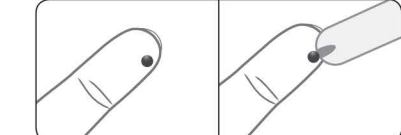

8. Obrišite mesto uboda čistom, suvom maramicom i **održavajte pritisak** na mestu uboda sve do zaustavljanja krvarenja.

Izbacite i odložite upotrebijenu lancetu

Da biste sprečili povrede ili kontaminaciju drugih osoba, upotrebijenu lancetu obavezno odložite kao medicinski otpad. Za svako merenje koristite novu lancetu. **Lancete nemojte koristiti više puta.**

Vaš lancetar MICROLET NEXT ima dugme za izbacivanje lancete. Lancetu iz lancetara nemojte uklanjati prstima.



1. Pažljivo skinite poklopac sa lancetara. Odvrnite belu traku poklopa tako da se bela odignuta oznaka poklopi sa crnom utisnutom oznakom, kao što je prikazano. Skinite poklopac.



Kad čujete „**škljoc**“ poklopac je otključan

2. Stavite okruglu zaštitnu kapicu, koju ste sačuvali, na ravnu površinu. Dok je upotrebljena lanceta još uvek u lancetaru, gurnite lancetu u sredinu kapice.



Nastavak na drugoj strani

ARTWORK ROUTING FOR APPROVAL

SCHAWK!		Art Production	
DATE: 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 Tel: 425-881-9454	CLIENT: Ascensia Diabetes Care	BAN#: CTS-162 Rev. 09/19	Microlet Next STYX 4 Lang. insert - EC upadate
DESCRIPTION: Microlet Next STYX 4 Language insert - English	SKAWK JOB#: 918416	Alt#1 - 02/16/16 Copy Changes	Alt#6 - 09/28/16 Copy Changes
SKU#: XXXX Parent BAN# XXXXXXXX	DIMENSIONS: 15.5" (H) x 25" (W)	Alt#2 - 02/25/16 Copy Changes	Alt#7 - 10/18/16 Copy Changes
PRINTER SPEC: 10000745143 REV -	FONT: Helvetica Neue, Helvetica	Alt#3 - 03/01/16 Copy/layout Changes	Alt#8 - 09/07/19 EC Update
COLORS: Black		Alt#4 - 03/07/16 Copy Changes	Alt#5 - 03/11/16 Copy Changes
Clinical Trial/Global Master Template No: DCAM-55-624			
Regional Master Template No: XXXX			
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.			
RELEASE: V-7 INTERNAL: R-1 LANGUAGE(S): ENGLISH			