

Dobro došli!

Hvala što ste kupili Sugrbag rashladnu futrolu za insulin. Molimo Vas da odvojite svega par minuta, pažljivo pročitate ovu brošuru i informišete se o pravilnoj upotrebi Sugrbag rashladne futrole, kako bi je efikasno koristili iznova i iznova.

Sugrbag čuva insulin čak i kad je jako vruće!

Prema preporukama proizvođača, insulin koji se koristi treba držati u odgovarajućem penu, ne čuvati u frižideru, zaštićenog od svetlosti, na temperaturi koja ne prelazi 30 °C (kod nekih insulina i do 25 °C).

Sugrbag rashladne futrole su dizajnirane tako da postižu i održavaju do 5 sati temperaturu optimalnu za čuvanje insulina (temperaturu od 18 °C - 26 °C).

Sastav

Svaka Sugrbag rashladna futrola se sastoji od spoljašnje, najlonske futrole i unutrašnje termostabilne futrole punjene netoksičnim i nezapaljivim gelom.

Način upotrebe

Način upotrebe Sugrbag rashladne futrole je vrlo jednostavan:

1. Futrolu smestite u frižider, NE U ZAMRZIVAČ.
2. Nakon 2h futrola je spremna za korišćenje narednih 5h na temperaturama do 38°C.

Čuvanje i čišćenje

Spoljašnji deo Sugrbag rashladne futrole se može prati toplom vodom i blagim deterdžentom. Unutrašnji deo Sugrbag rashladne futrole se može prati upotrebom neke meke četke i sapunice blagog deterdženta. U istu svrhu mogu se koristiti i antibakterijska sredstva za čišćenje u spreju ili antibakterijske maramice za decu ili za upotrebu u kuhinji.

Dodatne informacije

Sugrbag rashladne torbice mogu da reaguju različito na različite klimatske uslove. Gore date instrukcije su opšteg tipa. Ukoliko se Sugrbag rashladne futrole koriste na opisan način biće od koristi duži vremenski period. Proizvođačka garancija na proizvod je 12 meseci. Na rok upotrebe bitno utiču klimatski uslovi kao i učestalost upotrebe.

Distributer:
Medinic export-import doo
Sazonova 52
11000 Beograd
Tel. 011/ 304 77 44