

## **Dobro došli!**

Hvala što ste kupili Sugrbag rashladnu torbicu za insulin. Molimo Vas da odvojite svega par minuta, pažljivo pročitate ovu brošuru i informišete se o pravilanoj upotrebi Sugrbag rashladne torbice, kako bi je efikasno koristili iznova i iznova.

## **Sugrbag čuva insulin čak i kad je jako vruće!**

Prema preporukama proizvođača, insulin koji se koristi treba držati u odgovarajućem penu, ne čuvati u frižideru, zaštićenog od svetlosti, na temperaturi koja ne prelazi 30 °C (kod nekih insulina i do 25 °C).

Sugrbag rashladne torbice su dizajnirane tako da postižu i održavaju oko 50 sati temperaturu optimalnu za čuvanje insulina (temperaturu od 18 °C - 26 °C). Sistem se zasniva na hlađenju putem isparavanja, pa ga je moguće lako, bezbedno „dopuniti“ kad god to korisniku odgovora, jednostavnim potapanjem uložka u vodu na par minuta.

## **Sastav**

Svaka Sugrbag rashladna torbica se sastoji od spoljnog voodootpornog dela i unutrašnjeg dela koji u sebi sadrži netoksične i nezapaljive kristale.

## **Način upotrebe**

Način upotrebe Sugrbag rashladne torbice je vrlo jednostavan:

1. Unutrašnji deo Sugrbag rashladne torbice potpiti u vodu na 5-10 minuta. Veoma je važno ispoštovati preporučeno vreme potapanja torbice, kako bi se absorbovala adekvatna količina vode. Ukoliko se torbice drže potopljene duže od preporučenog vremena, može se absorbovati značajno veća količina vode zbog čega će proizvod privremeno biti ne upotrebljiv. Ukoliko se to desi potrebno je proizvod ostaviti da se osuši prirodnim putem, sve dok se ne vrati u stanje u kom je moguće koristiti ga ponovo.
2. Dok se Sugrbag rashladna torbica natapa vodom, poželjno je nežnim pokretima rasporediti kristale ravnomerno po torbici. Gel koji se formira natapanjem kristala treba da popuni pregrade torbice, ali ne bi trebao da se raširi/nabubri do te mere da pregrade torbice postanu jako tvrde. Sugrbag rashladna torbica spremna za upotrebu je lako savitljiva.
3. Nakon isteka preporučenog vremena potapanja, ostavite torbicu oko 15-30 minuta kako bi formirani gel upio tečnost koja se nalazi u samom materijalu. Za očekivati je da nakon vađenja torbice iz tečnosti gel nastavi da se širi, još neko vreme.
4. Na kraju nežno, suvim peškirom ili ubrusom posušiti unutrašnji deo torbice i smestiti ga u spoljnji, vodotporni deo.

Ukoliko se Sugrbag rashladne torbice stalno koriste, trebalo bi ih potapati svakih 45 sati ili popotrebi i ranije, tj. kada primetite da se količina gela smanjila i počela vraćati u kristalno stanje (kristali se mogu osetiti pod rukom). U ovom slučaju vreme potapanja treba skratiti na svega par minuta.

**AKTIVIRANE TORBICE NE DRŽITE U HERMETIČKI ZATVORENIM I/ILI VODOTPORNIM POSUDAMA.**

S obzirom na to da se sistem hlađenja Sugrbag rashladnih torbica bazira na isparavanju tečnosti, potrebno je da se Sugrbag rashladnih torbica nalazi u kontaktu sa vazduhom, tj. ne treba da je stavljate u hermetički zatvorene ili vodootporne posude. Zahvaljujući materijalima od kojih je napravljena Sugrbag rashladna torbica je pogodna za nošenje u ručnim tašnama, džepovima odeće i sl.

Sugrbag rashladne torbice NE STAVLJATI u frižider i / ili zamrzivač zbog rizika od oštećenja materijala od kojih je napravljena.

### **Čuvanje i čišćenje**

Kada nije u upotrebi izvadite unutrašnji deo torbice iz spoljašnjeg dela i ostavite da se u potpunosti osuši, tako da se gel vrati u kristalno stanje. Kako bi se kristali razdvojili, povremeno tokom sušenja torbicu protresite.

Napomena: period sušenja može da traje 2-4 nedelje u zavisnosti od klimatskih uslova. Da bi ubrzali proces sušenja Sugrbag rashladnih torbica se može staviti na npr. radijator, okačiti na štrik za sušenje veša, ostaviti izloženu direktnom suncu, naravno uz povremeno protresanje.

NE STAVLJATI u mašinu za sušenje veša. Potpuno suhu Sugrbag rashladnu torbicu ostavite na neko suvo mesto do sledeće upotrebe.

Spoljašnji deo Sugrbag rashladne torbice se može prati toplom vodom i blagim deterdžentom. Unutrašnji deo Frio torbice se može prati upotrebom neke meke četke i sapunice blagog deterdženta. Nakon što ste ga isčetkali, možete ga isprati ispod mlaza tekuće vode, a da se pri tome neće oštetiti kristalno punjenje. U istu svrhu mogu se koristiti i antibakterijska sredstva za čišćenje u spreju ili antibakterijske maramice za decu ili za upotrebu u kuhinji.

### **Dodatne informacije**

Sugrbag rashladne torbice mogu da reaguju različito na različite klimatske uslove. Gore date instrukcije su opšteg tipa. Ukoliko se Sugrbag rashladne torbice koriste na opisan način biće od koristi duži vremenski period. Proizvođačka garancija na proizvod je 12 meseci. Dokumentovane su višegodišnje upotrebe proizvoda, ali na rok upotrebe bitno utiču klimatski uslovi kao i učestalost upotrebe. Vremenom zbog „starenja“ materijala, dužina potapanja potrebna da se postigne željeni efekat može biti duža, ali dok god torbica funkcioniše adekvatno. U trenutku kada pri potapanju kristali ne prelaze u gel stanje, potrebno je nabaviti novu Sugrbag rashladnu torbicu.

**Video uputstvo za upotrebu potražite na:**

[www.medic.co.rs/sugrbag.html](http://www.medic.co.rs/sugrbag.html)

Distributer:

Medinic export-import doo

Sazonova 52

11000 Beograd

Tel. 011/ 304 77 44